


# SHINE gebruikers instructie

## 1. VOORBEREIDING

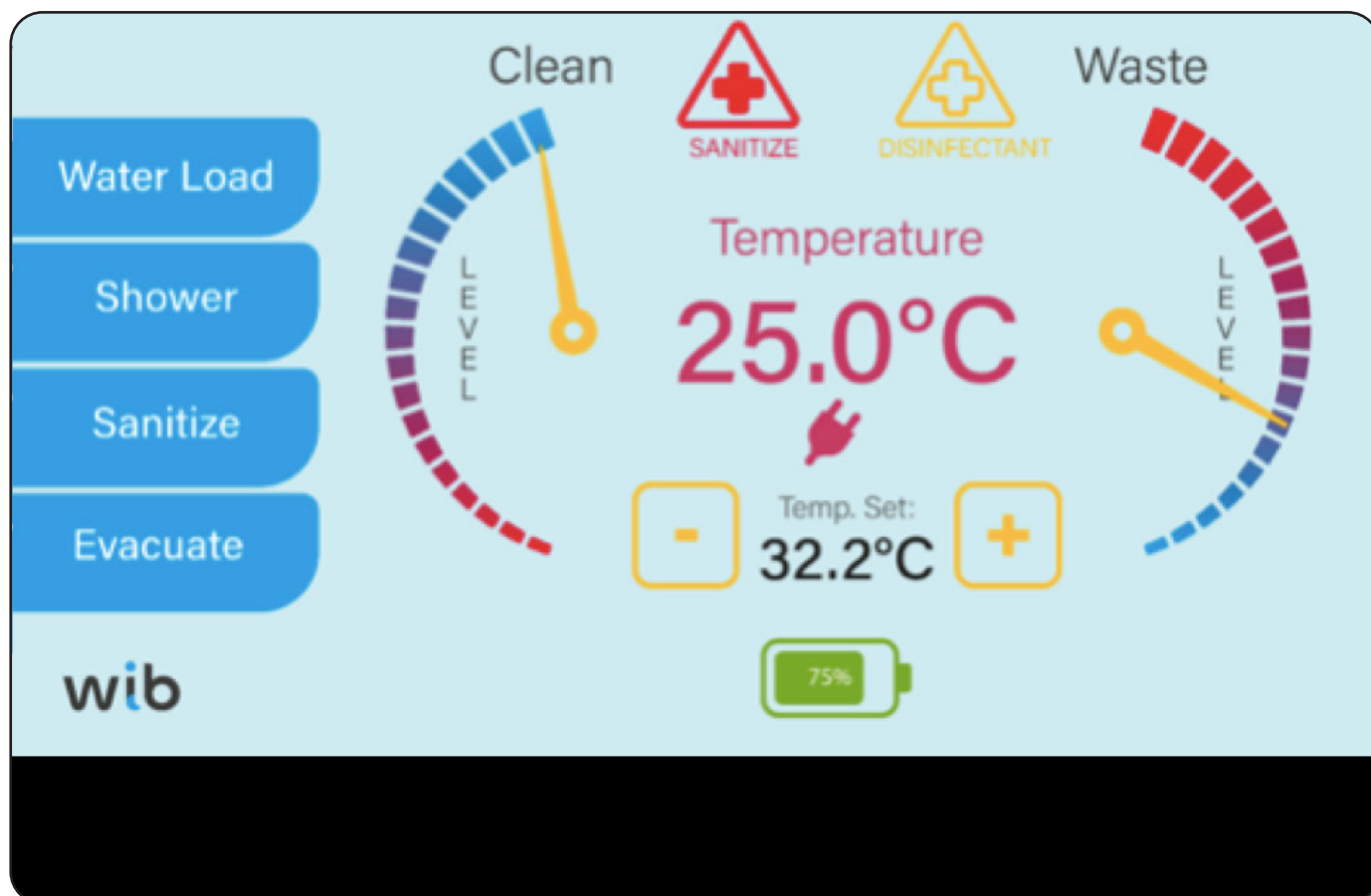

SHINE DISPLAY REFERENTIE

Voor het vullen van SHINE met water:

- sluit de speciale meegeleverde adapter aan op de waterkraan
- sluit de **BLAUWE SLANG** aan op de SHINE en op de waterkraan
- draai de kraan open en druk op **WATER LOAD**
- stel de gewenste temperatuur in
- als de SHINE bijna vol is wordt een hoorbaar signaal afgegeven
- indien de SHINE helemaal vol is staat er **COMPLETED** op het display. wacht nu tot de gewenste temperatuur is bereikt.

## 2. HET DOUCHEN

- als het **SHOWER** lampje knippert is SHINE gereed voor het douchen.  
Druk nu op de **SHOWER** knop van het display.



- voel eerst met je hand in het waterbakje of de juiste temperatuur is bereikt.



- verwarm de afzuiger met warm water en plaats deze tussen de benen van de cliënt.

### 3. NAZORG

Ter referentie de SHINE achterkant met links de ZWARTE en rechts de BLAUWE slang.

Ter referentie de aansluiting van SHINE.



#### A. WATERTANK LEGEN

Sluit de zwarte slang aan op de SHINE en hang deze in een afvoer.

Druk op **EVACUATE** De tank met vuil water wordt nu geleegd.

#### B. DESINFECTEREN

- maak de blauwe slang vast aan de kraan en aan de SHINE
- maak de zwarte slang vast aan de SHINE en hang deze in een afvoer ( bijv. een toilet, wasbak )
- zet de kraan open en druk op **SANITIZE**
- de SHINE gaat zichzelf nu reinigen.

NB: op een gegeven moment staat er dat hij nog 0 seconden moet, maar SHINE is pas klaar als er **COMPLETED** staat.

- koppel de slangen af en SHINE is weer klaar voor gebruik.

# AANDACHTSPUNTEN

- als het nodig is de watertank tussentijds bij te vullen, leeg dan ook de vuilwater tank
- desinfecteren dient eens in de 48 uur te gebeuren
- zorg dat de **GROENE KNOP** aan de achterkant altijd aan staat
- duw de slangen niet terug in de SHINE
- zorg dat er ten allen tijde nog 10 % schoon water in de tank zit, zodat het gebruikte water nog kan worden weggezogen.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

**LevareCura**  
professionele apparatuur en diensten voor  
therapie & zorg

[info@levarecura.nl](mailto:info@levarecura.nl)  
**0578-66 11 20**  
[www.levarecura.nl](http://www.levarecura.nl)